

Lagerungshilfen von **Dandie•LI•N[®]** MEDICAL



Revision 4 – 06/2026

Unsere interne Qualitätspolitik verpflichtet uns zu kontinuierlicher Weiterentwicklung und Produktverbesserung. Wir behalten uns daher vor, Produkte bzw. deren Leistungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

© MED CARE VISIONS®

INHALT

Lagerungshilfen von Dandlelion®

NeoBellyBand.....	4
Snuggly ROO™.....	6
Dandle® ROO2.....	8
Dandle® ROO Lite.....	10
Dandle® WRAP Stretch.....	11
Cozy Cub™.....	14
Dandle® PAL.....	15
Polly PAL™.....	15
Mini PAL.....	16
Dandy Prone Pad™.....	17
Thermomützen.....	18
Dandle LION® Gelkissen.....	18
Impressum.....	21



NeoBellyBand™



NeoBellyBand™

Die Integrität der Bauchdecke ist entscheidend für die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems, des Magen-Darm-Trakts sowie des Muskel-Skelett-Systems. Wird diese Integrität durch Gasansammlungen, Frühgeburtlichkeit oder anatomische Anomalien beeinträchtigt, kann die Stabilität der Bauchmuskulatur und des Brustkorbs gestört sein. Dies wirkt sich negativ auf die dynamische Stabilisierung der Bauchmuskulatur aus.

Das NeoBellyBand™ wurde von Ginny McGill, einer Physiotherapeutin (Dr.), zertifizierten Neonataltherapeutin sowie Expertin für neonatale Berührungs- und Massagetherapie, speziell für die Bedürfnisse von Säuglingen entwickelt. Das Band lässt sich einfach anlegen und eignet sich für Babys mit normaler Magen-Darm-Funktion. Mithilfe einer beigefügten Videoanleitung kann diese evidenzbasierte Maßnahme problemlos angewendet werden, wenn eine Unterstützung der Bauchdecke notwendig ist.

- Medizinische Kombination aus Stoff und Schaumstoff, die sicher auf der Haut von Frühgeborenen angewendet werden kann
- Weiche Schaumstoffeinlage, die leicht, atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend ist
- Verstellbares Außenmaterial mit Klettverschluss
- Frei von Latex und Neopren
- In fünf Größen erhältlich, die sich den individuellen Bedürfnissen von Säuglingen anpassen lassen
- Single Patient - Multi Use; kann von Hand gewaschen und beim selben Patienten wiederverwendet werden
- Verpackungseinheit: 2 Stück pro Beutel



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	Art.-Nr.
NeoBellyBand™ - XS (7x30 cm), Bauchunterstützung für Säuglinge (Doppelpack)	10 Stück	DL23420B10
NeoBellyBand™ - S (9x40 cm), Bauchunterstützung für Säuglinge (Doppelpack)	10 Stück	DL23421B10
NeoBellyBand™ - M (12x50 cm), Bauchunterstützung für Säuglinge (Doppelpack)	10 Stück	DL23422B10
NeoBellyBand™ - L (15x55 cm), Bauchunterstützung für Säuglinge (Doppelpack)	10 Stück	DL23423B10
NeoBellyBand™ - XL (19x60 cm), Bauchunterstützung für Säuglinge (Doppelpack)	10 Stück	DL23424B10





Snuggly ROO™ - Mehrweg/waschbar



Snuggly ROO™ - Einweg



Snuggly ROO™ mit Dandle® PAL

Snuggly ROO™

Der Snuggly ROO™ ist Teil der Dandle-LION® Familie von Produkten zur Lagerung von Kindern mit Entwicklungsstörungen. Er ist nützlich für die Aufnahme, den Transport und den perioperativen Zeitraum, weil er eine bessere Sicht auf den Säugling bietet und gleichzeitig Unterstützung und Rückhalt.

Die gepolsterte Fußrolle hält die unteren Extremitäten gebeugt, während die versetzten Gurte dazu beitragen, dass die Hände zum Gesicht zeigen, die Schultern gerundet und die Arme in Beugung gehalten werden. In Kombination mit dem Dandle® PAL ist der Snuggly ROO™ ideal, um den Kopf in der Mittellinie zu halten und den Säugling für die Betreuenden sichtbar zu halten. Nach der ersten kritischen Phase kann der Säugling in den Dandle® ROO2 wechseln, um eine optimalere und entwicklungsgerechte, stabile Lagerung zu erhalten.

- Gestepteter Boden, Fußrolle und Riemen aus einem Baumwoll-Polyester-Interlock-Gemisch
- Erhältlich in vier Größen - erkennbar auch an dem farbigen Rand:

- XS: < 1000 g Farbe: Orange
- S: 1000 - 1800 g Farbe: Gelb
- M: 1800 - 2500 g Farbe: Grün
- L: 2500 - 3600 g Farbe: Blau

- Auch als Einwegartikel aus weichem Vliesstoff erhältlich

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Snuggly ROO™ - Einweg		
Snuggly ROO™ Größe XS: < 1000 g	12 Stück	DL21031B12
Snuggly ROO™ Größe S: 1000 g - 1500 g	12 Stück	DL21032B12
Snuggly ROO™ Größe M: 1500 g - 2500 g	12 Stück	DL21033B12
Snuggly ROO™ Größe L: 2500 g - 3600 g	12 Stück	DL21034B12
Snuggly ROO™ - Mehrweg / waschbar		
Snuggly ROO™ Größe XS: < 1000 g	12 Stück	DL21621B12
Snuggly ROO™ Größe S: 1000 g - 1500 g	12 Stück	DL21622B12
Snuggly ROO™ Größe M: 1500 g - 2500 g	12 Stück	DL21623B12
Snuggly ROO™ Größe L: 2500 g - 3600 g	12 Stück	DL21624B12





Dandle® ROO2



Dandle® ROO2

Dandle® ROO2 zur geeigneten unterstützenden Lagerung, die die physiologische und verhaltensmäßige Toleranz gegenüber Eingriffen auf der NICU verbessert, Stress verringert und das sich entwickelnde Gehirn des Säuglings unterstützt. Die gebeugte Position des Säuglings im Mutterleib ist die Grundlage für alle zukünftigen Bewegung, die jedoch außerhalb des Mutterleibs nur schwer zu imitieren ist.

Der ROO2 ist aus einem Hochleistungsgewebe hergestellt und bietet dadurch eine 360°-Stütze. Dies ermöglicht dem Säugling sich einerseits zu bewegen und zu drehen und sich dann auch wieder in eine kontrollierte, gebeugte Mittelposition zurück zu bewegen. So kann der Säugling sich frei bewegen und muss nicht in einer statischen Position verharren.

- Fördert die physiologische und verhaltensmäßige Stabilität
- Reduziert Stress
- Fördert die Selbstregulierung
- Kann den Bedarf von Schmerz- und/oder Beruhigungsmitteln verringern, die die normale Entwicklung des Gehirns und die synaptische Konnektivität beeinträchtigen können
- Fördert den Schlaf, der für die neurosensorische Reifung, das Gedächtnis/Lernen, die langfristige Vernetzung des Gehirns und die Erhaltung der Plastizität des Gehirns unerlässlich ist
- Optimiert die Entwicklung des Skeletts und die biomechanische Ausrichtung
- Ermutigt zur Bewegung
- Bietet kontrollierten Kontakt mit verschiedenen propriozeptiven, taktilen und visuellen Reizen
- Bietet der Betreuungsperson ein „weiteres Paar Hände“, um das Kind während des Verfahrens zu stützen und zu trösten

Der ROO2 ist aus einem Hochleistungsgewebe mit 3-Wege-Stretch gefertigt, das ursprünglich für sportliche Anwendungen entwickelt wurde. Dies gibt dem Säugling Bewegungsfreiheit und bringt ihn in die Beugung zurück.

Eine Schlüsselkomponente des ROO2-Systems ist die Mehrzweckrolle. Die Rolle kann auf verschiedene Weise verwendet werden - als Bauchrolle in der Bauchlage, als Kissen hinter dem Rücken in der Seitenlage oder zur Unterstützung der Beckenneigung in der Bauch- oder Rückenlage, wie in den Abbildungen gezeigt. Die Aufrechterhaltung der hinteren Seitenlage eines Säuglings ist wichtig für Entwicklungsschritte, wie das Drehen, Aufsetzen und Krabbeln.

Die Mehrzweckrolle ist in den Bildern weiß umrandet. Sobald die Hüften und Beine des Säuglings in die richtige Position gebracht sind, kann die Rolle gegen die Rückseite der Oberschenkel/des Gesäßes gelegt und dann mit etwas Spannung an der Unterseite des ROO2 befestigt werden. Dies hilft dem Säugling die Position zu halten. Manche Säuglinge können von mehr als einer Rolle profitieren.

Hinweis:

Achten Sie in der Bauchlage darauf, dass Brust und Kopf des Säuglings gestützt werden, damit die Wirbelsäule neutral ausgerichtet ist.

Der Beutel und die Flügel sorgen zusammen für eine umlaufende Unterstützung wie im Mutterleib!

- Zwei Flügel, von denen der längere am Rücken befestigt ist, helfen dabei, die Hände zum Gesicht zu halten, um sich selbst zu beruhigen und die Schultern nach vorne zu drehen
- Die Kopfrolle sorgt für Sicherheit und kann zur Abstützung von Schläuchen oder anderen Geräten umgeklappt oder ganz weggeklappt werden. Das Zubehör für die Krempe kann auch an der Kopfrolle befestigt werden, um zu verhindern, dass direktes Licht in die Augen scheint.
- Mit dem Klettverschluss an der Außenseite des Flügels kann die Pflegekraft die Tasche hochziehen, um genau das richtige Maß an Beugung oder Bewegungsfreiheit für die unteren Extremitäten zu gewährleisten.



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle® ROO2 - Starter Pack mit 4 Stk. / Größe Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch, waschbar	12 Stück	DL14550B12
Dandle® ROO2 & Zubehör Größe XS: < 1000 g		
Dandle® ROO2 - Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch	12 Stück	DL14510B12
Dandle® Mehrzweckrolle für ROO2	25 Stück	DL14510ROLLB25
Augenschutz für Dandle® ROO2, als abnehmbare Krempe, die die Augen des Säuglings vor direktem Licht schützen und auf dem Rand des Lagerungssystem mit Klettverschluss fixiert werden kann	25 Stück	DL14510BRMB25
Dandle® ROO2 - Gel Kissen 15 x 23 cm mit bedrucktem Baumwollbezug, waschbar	12 Stück	DL14510GPB12
Dandle® ROO2 - Ersatzbezüge aus bedruckter Baumwolle für Gelkissen 15 x 23 cm, waschbar	25 Stück	DL14510GPCB25
Dandle® ROO2 & Zubehör Größe S: 1000 - 1800 g		
Dandle® ROO2 - Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch	12 Stück	DL14520B12
Dandle® Mehrzweckrolle für ROO2	25 Stück	DL14520ROLLB25
Augenschutz für Dandle® ROO2, als abnehmbare Krempe, die die Augen des Säuglings vor direktem Licht schützen und auf dem Rand des Lagerungssystem mit Klettverschluss fixiert werden kann	25 Stück	DL14520BRMB25
Dandle® ROO2 - Gel Kissen 15 x 28 cm mit bedrucktem Baumwollbezug, waschbar	12 Stück	DL14520GPB12
Dandle® ROO2 - Ersatzbezüge aus bedruckter Baumwolle für Gelkissen 15 x 28 cm, waschbar	25 Stück	DL14520GPCB25
Dandle® ROO2 & Zubehör Größe M: 1800 - 2500 g		
Dandle® ROO2 - Neurolagerungshilfe mit 3-Wege Stretch, waschbar	12 Stück	DL14530B12
Dandle® Mehrzweckrolle für ROO2	25 Stück	DL14530ROLLB25
Augenschutz für Dandle® ROO2, als abnehmbare Krempe, die die Augen des Säuglings vor direktem Licht schützen und auf dem Rand des Lagerungssystem mit Klettverschluss fixiert werden kann	25 Stück	DL14530BRMB25
Dandle® ROO2 - Gel Kissen 15 x 31 cm mit bedrucktem Baumwollbezug, waschbar	12 Stück	DL14530GPB12
Dandle® ROO2 - Ersatzbezüge aus bedruckter Baumwolle für Gelkissen 15 x 31 cm, waschbar	25 Stück	DL14530GPCB25





Dandle® ROO Lite



Augenschutz für Dandle® ROO Lite

Dandle® ROO Lite

Das Phototherapie-lagerungssystem Dandle® ROO Lite ist aus leichter Baumwolle gefertigt, die 74 % des Phototherapie-lights durch die Materialschichten hin durchlässt und somit unruhigen Neugeborene hilft sich zu entspannen und zur Ruhe zu finden. Wie bei dem Dandle® ROO2 hält der umlaufende Rand den Säugling in einer gebärmutterähnlichen, gebeugten Mittellage, während sie propriozeptives Feedback gibt und freie Bewegung und Rückstoß ermöglicht.

- Hergestellt aus weicher, dehnbare Baumwolle, nicht aus synthetischem Vliesstoff
- Kann von Hand gewaschen oder einfach weggeworfen werden, wenn keine Waschgelegenheit vorhanden ist!
- Verstellbare Mikroverschlüsse bieten sicheren Halt
- Obere und untere Extremitäten können unabhängig voneinander eingestellt werden und können je nach den medizinischen oder entwicklungsbedingten Bedürfnissen des Säuglings individuell angepasst werden
- Die Kopfrolle kann zur Unterbringung und/oder Unterstützung medizinischer Materialien aus dem Weg geschoben werden
- Aufnahmen, „chaotische“ Eingriffe, Augenuntersuchungen, Hörscreenings, während des Transports, für unruhige Babys während der Fototherapie und immer dann, wenn ein Baby von einer Begrenzung oder Beruhigung profitieren würde!



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Lagerungshilfe Dandle Roo Lite		
Dandle® ROO Lite - Größe XS: < 1000 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11031B12
Dandle® ROO Lite - Größe S: 1000 - 1800 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11032B12
Dandle® ROO Lite - Größe M: 1800 - 2500 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11033B12
Dandle® ROO Lite - Größe L: 2500 - 3600 g Phototherapie Nest- Lagerungssystem mit räumlicher Begrenzung	12 Stück	DL11034B12
Augenschutz für Dandle Roo Lite		
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - Größe XS: < 1000 g	25 Stück	DL11031BRMB25
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - Größe S: 1000 - 1800 g	25 Stück	DL11032BRMB25
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - Größe M: 1800 - 2500 g	25 Stück	DL11033BRMB25
Augenschutz für Dandle® ROO Lite - Größe L: 2500 - 3600 g	25 Stück	DL11034BRMB25

Dandle® WRAP Stretch

Säuglinge lieben es, gepuckt zu werden! Durch die Einschränkung der motorischen Aktivität wird die Sicherheit des Mutterleibs nachgeahmt. Das tröstet sie und führt zu weniger Schreien, einer stabileren Herzfrequenzen und der Fähigkeit, den Schreckreflex zu überwinden. In einer systematischen Untersuchung des Wickelns*, die 2007 in der Fachzeitschrift Pediatrics veröffentlicht wurde, stellten die Autoren fest, dass: „gepuckte Säuglinge weniger wach sind und länger schlafen. Frühgeborene haben eine bessere neuromuskuläre Entwicklung, weniger physiologischen Stress, eine bessere motorische Organisation, sowie ein höheres Maß an Selbstregulierungsfähigkeit.

Auch in Fällen von neonatalem Abstinenzsyndrom und bei Säuglingen mit neonatalen, zerebralen Läsionen unterstützt das Pucken die Therapie“. Der Dandle WRAP Stretch™ bietet viele Vorteile beim Pucken gegenüber herkömmlichen Materialien. Das 3-Wege-Stretch Hochleistungsgewebe ermöglicht Bewegungsfreiheit und fördert gleichzeitig die Rückstellung auf die Mittellinie im Ruhezustand. Eine große Auswahl an Größen ermöglicht die optimale und unterstützende Lagerung, für alle Säuglinge, während des Krankenhausaufenthalt.

- Ein Beutel zur Aufrechterhaltung der Beugung der unteren Extremitäten
- Breite Flügel, welche die Schultern in der Beugung unterstützen und das Selbstberuhigungsverhalten der Hand zum Mund fördern
- Klettverschlüsse an Tasche und Flügeln, die unabhängig voneinander verstellbar sind, um den individuellen Bedürfnissen des Säuglings gerecht zu werden
- Atmungsaktives und gleichzeitig saugfähiges Material, ideal für unruhige Säuglinge
- Viel Platz zwischen der Tasche und den Flügeln für Leitungen bzw. Schläuche

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Dandle® WRAP Stretch - Größe XS: < 1000g, waschbar	12 Stück	DL14531B12
Dandle® WRAP Stretch - Größe S: 1000 - 1800 g, waschbar	12 Stück	DL14532B12
Dandle® WRAP Stretch - Größe M: 1800 - 2500 g, waschbar	12 Stück	DL14533B12
Dandle® WRAP Stretch - Größe L: 2500 - 3600 g, waschbar	12 Stück	DL14534B12
Dandle® WRAP Stretch - Größe XL: 3600 - 4400 g, waschbar	12 Stück	DL14535B12
Dandle® WRAP Stretch - Größe XXL: > 4400 g, waschbar	12 Stück	DL14536B12
Dandle® WRAP Stretch™ - Auswahlpackung mit jeweils 3 Stück der Größen M, L und XL, waschbar	9 Stück	DL14538B12

*Wickeln: A Systematic Review van Sleuwen et al, Pediatrics, Vol. 120, No. 4 October 1, 2007, pp. e1097-1106



Dandle® WRAP Stretch









Cozy Cub™ mit Bezügen aus Baumwolle

Cozy Cub™

Die Lagerungsrolle Cozy Cub™ ist eine flexible Begrenzung, die mit seidigen Mikroscheiben gefüllt ist. Die anschmiegsame Füllung passt sich individuell der einzigartigen Form jedes Säuglings an und bietet Unterstützung genau da, wo sie benötigt wird. Weil beim Einsatz dieses Lagerungsproduktes immer eine vollständige Sicht auf das Kind erhalten bleibt, ist der Einsatz bei verschiedensten Verfahren und Therapien wie z. B. Phototherapie, chirurgische Eingriffe und ECMO prädestiniert. Auch bei Bewegung, gewährleisten die einzigartigen, nach Größe farb-kodierten Befestigungsschlaufen Form- und Nähe zum Säugling.

- Ermöglicht in Notfällen den sofortigen Zugang zum Säugling
- Nützlich für Patienten mit besonderen oder kritischen Lagerungsanforderungen
- Leicht anpassbar bei der Verwendung mit medizinischen Geräten
- Fähigkeit zur beruhigenden Beugung während des Transports

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Größe S - circa 120 cm lang		
Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle als gewichtete Begrenzung, die pro-priozeptives Feedback liefert, abwischbar, mit Einwegbezug	4 Stück	DL17205B4
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17215CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17225CB25
Größe L - circa 122 cm		
Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle als gewichtete Begrenzung, die pro-priozeptives Feedback liefert, abwischbar, mit Einwegbezug	4 Stück	DL17005B4
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17015CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17025CB25
Größe XL - circa 152 cm		
Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle als gewichtete Begrenzung, die pro-priozeptives Feedback liefert, abwischbar, mit Einwegbezug	4 Stück	DL17805B2
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® COZY CUB™ Lagerungsrolle XL	25 Stück	DL17815CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® COZY CUB™	25 Stück	DL17825CB25



Dandle® PAL

Der Dandle® PAL ist ein flexibles Lagerungszubehör, das allein, paarweise oder als Ergänzung zu anderen Lagerungshilfen verwendet werden kann. Zwei separate Taschen im Dandle® PAL sind mit winzigen Kunststoff-Mikroscheiben gefüllt, die sich seidig anfühlen. Dieses einzigartige Zwei-Taschen-Konzept ermöglicht es, die Höhe und Stabilität des Dandle® PAL an die Bedürfnisse des jeweiligen Säuglings anzupassen.

So können flexible Grenzen und propriozeptiven Input erreicht werden. Der größere Beutel im Hufeisen ermöglicht Unterstützung und Flexion, der kleine Beutel kann oben auf das Hufeisen gelegt werden, um zusätzliche Höhe- oder Unterstützung zu erreichen.



Erhältlich in zwei Ausführungen, um jeden Anfordergen gerecht zu werden:

- Abwaschbar mit Einweg- oder wiederverwendbaren Stoffbezügen
- Waschbar

Ermöglicht eine Vielzahl von Funktionen für Säuglinge und deren Betreuer:

- Wirkt während der Patientenversorgung wie ein zusätzliches Paar Hände zum Trösten
- Unterstützt die richtige Platzierung medizinischer Produkte, um das Risiko von Fehlstellungen, unbeabsichtigter Entfernung oder Druckverletzungen zu verringern
- Kann alleine, zu mehreren oder in Kombination mit anderen Lagerungshilfen verwendet werden, um eine Vielzahl von klinischen Anforderungen zu erfüllen



Dandle® PAL



Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle® PAL Säuglingslagerungshilfe (Einheitsgröße, waschbar)	10 Stück	DL11505B10
Dandle® PAL Säuglingslagerungshilfe (Einheitsgröße, abwischbar)	10 Stück	DL20505B10
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® PAL abwischbar	25 Stück	DL20515CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® PAL abwischbar	25 Stück	DL20525CB25

Polly PAL™

Polly PAL™, die kleine Schwester von Dandle® PAL, ist eine kleine, flexible Begrenzung, die bei der Lagerung von Frühchen hilft. Das Ein-Beutel-Design ist mit winzigen, weichen Kunststoff-Mikroscheiben gefüllt, die sich seidig anfühlen.

Das Polly PAL™ hilft beim Erreichen und Beibehalten bestimmter Positionen des Frühchens oder der Ausrüstung und kann um Kopf, Hals und Hüfte des Säuglings positioniert werden. Um Widerstand aufzubauen ist es möglich den Säugling auch teilweise damit zu bedecken.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle- LION® Polly PAL™ Säuglingslagerungshilfe (Einheitsgröße, waschbar)	10 Stück	DL21755B10



Polly PAL™



Mini PAL™

Mini PAL

Unser MINI PAL™ wurde speziell für die besonderen Bedürfnisse der kleinsten Patienten entwickelt. Als leichte Lagerungshilfe mit nur 170 g passen sich die seidigen Mikroscheiben im Inneren des MINI PAL™ optimal an die Form jedes Fröhchens an und bieten propriozeptiven Input.

Auf Grund des niedrigen Gesamtgewichtes kann der MINI PAL™ z.B. mit den „Beinchen“ über das Fröhchen gelegt werden, aber auch vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten bieten sich: als Hilfsmittel zur Unterstützung medizinischer Systeme, mit nur ganz gerigem Platzbedarf; als Einsatz im XS Dandle® ROO2 oder Dandle® ROO Lite zum Ausfüllen des Raums am Boden der Tasche, damit die Flügel und die Tasche richtig passen. MINI PAL™ ist das leichte Lagerungshilfsmittel, dass sanft neben dem Baby platziert wird, wobei die „Beine“ über die Schultern, die Hüften oder hinter den Kopf des Fröhchens gelegt werden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle- LION® MINI PAL™ Lagerungshilfe für Fröhchen (waschbar)	10 Stück	DL23505B10
Dandle- LION® MINI PAL™ Lagerungshilfe für Fröhchen (abwischbar)	10 Stück	DL23545B10
Bezüge aus bedruckter Baumwolle, waschbar für Dandle® MINI PAL™ abwischbar	25 Stück	DL23515CB25
Einwegbezüge aus Vlies weiß für Dandle® MINI PAL™ abwischbar	25 Stück	DL23525CB25

Dandy Prone Pad™

Die Bauchlage ist eine bewährte Maßnahme in der klinischen Versorgung von Säuglingen und leistet einen wichtigen Beitrag zur physiologischen Stabilität sowie zur muskuloskeletta- len und neurologischen Entwicklung. Zu den Vorteilen der Bauchlage gehören:

- Verbesserter Atemstatus
- Verringerte Häufigkeit von gastroösophagealem Reflux
- Verringerter Stress
- Verbesserte Verdauung
- Verbesserte Knochendichte durch Belastung der oberen und unteren Extremitäten
- Verbesserte Schlafdauer und -qualität

Das Dandy Prone Pad™ unterstützt eine entwicklungsfördernde Bauchlage, die der natür- lichen Beugung des Fötus nachempfunden ist. Dank seiner Sanduhrform und der einzig- artigen unteren Stützen (Torpfofen) fördert es die Beugung der Extremitäten zur Körpermitte und sorgt für die korrekte Ausrichtung von Knie und Hüften. Mit fünf verfügbaren Größen, die nahtlos in die DandleLION®-Positionierungshilfen integriert werden können, lässt sich stets die passende Unterstützung für jeden Patienten finden.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandy Prone Pad™ mit Bezug - XS: für Säuglinge < 1000 g (single patient/ multi use)	12 Stück	DL21531B12
Dandy Prone Pad™ mit Bezug - S: für Säuglinge 1000 - 1800 g (single patient/ multi use)	12 Stück	DL21532B12
Dandy Prone Pad™ mit Bezug - M: für Säuglinge 1800 - 2500 g (single patient/ multi use)	12 Stück	DL21533B12
Dandy Prone Pad™ mit Bezug - L: für Säuglinge 2500 - 3600 g (single patient/ multi use)	12 Stück	DL21534B12
Dandy Prone Pad™ mit Bezug - XL: für Säuglinge > 3600 g (single patient/ multi use)	12 Stück	DL21535B12



Dandy Prone Pad™





Thermomützen

Thermomützen

Unterkühlung ist ein ernstes Problem für Säuglinge mit einem niedrigem Geburtsgewicht. Dabei bildet der Kopf mehr als 20 % der Gesamthautoberfläche des Kindes ab. Speziell bei Eingriffen in Räumen, mit einer nicht kontrollierten thermischen Umgebung (z. B. OP), ist der Wärmeverlust vorprogrammiert. Die Thermomütze von Dandle® LION verhindert das Entweichen von Wärme durch eine zweilagige Polyethylenlage (DEHP- und latexfrei), die in einen zweilagigen hautfreundlichen Stoff eingearbeitet ist. Das Material umgibt größenspezifisch den Kopf des Kindes vollständig und wirkt als eine Barriere gegen Wärme- und Feuchtigkeitsverluste. Außerdem wird die hörbare Lautstärke für den Säugling gedämpft.

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR:
Dandle® Thermomütze Frühchen, farbcodiert gelb- Preemie	50 Stück	DL12742B50
Dandle® Thermomütze Säugling, farbcodiert grün- Newborn	50 Stück	DL12843B50
Dandle® Thermomütze Säugling Plus, farbcodiert blau- Newborn Plus	50 Stück	DL17845B50



Dandle® Lion Gelkissen mit Mehrwegbezug

Dandle LION® Gelkissen

Die weichen, gelgefüllten Dandle®-LION-Kissen sind so konzipiert, dass sie die speziellen Lagerungsbedürfnisse von Frühgeborenen, Säuglingen & Kleinkindern erfüllen. Gelkissen können dazu beitragen, dass Säuglinge weniger häufig umgelagert werden müssen und immobilisierte Säuglinge liegen bequemer. Sie können auch für Säuglinge mit sehr geringem Geburtsgewicht als Matratze, oder für größere Säuglinge als Bauchrolle eingesetzt werden. Die Gelkissen können zur Desinfektion abgewischt und der wiederverwendbare Baumwollbezug gewaschen werden.



Dandle® Lion Gelkissen mit Einwegbezug



- Bezüge: weiße Baumwolle, bedruckte Baumwolle und Einweg-Vliesstoff
- Ungiftiges, wasserbasiertes Lebensmittelgel
- Garantiert für sechs Monate
- DEHP- und BPA-frei; nicht mit Naturlatex hergestellt
- Verwendung für einen einzigen Patienten (es sei denn, das Krankenhaus bereitet die Gelkissen mit einem eigens validierten Verfahren auf)

Bestellinformationen

PRODUKTBESCHREIBUNG	VPE	ART.-NR.
Gelkissen Größe 8 x 15 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 8 x 15 cm mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14558GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 8 x 15 cm	25 Stück	DL14558GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 8 x 15 cm	25 Stück	DL12558GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 15 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 15 cm mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14559GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 15 cm	25 Stück	DL14559GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 15 cm	25 Stück	DL12559GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 18 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 18 cm (pädiatrisch) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14555GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckter Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 18 cm	25 Stück	DL14555GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 18 cm	25 Stück	DL12555GPCB25
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 18 cm (pädiatrisch 2,3 cm dick) mit Bezug aus weißer Baumwolle	12 Stück	DL0955GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus weißer Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 18 cm	25 Stück	DL0955GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 23 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 23 cm (auch Dandle® ROO2 - XS: Gel Kissen) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14510GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 23 cm (auch für Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: XS)	25 Stück	DL14510GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen Größe XS: 15 x 23 cm	25 Stück	DL12551GPCB25
Dandle® Gelkissen Größe XS: 15 x 23 cm mit weißem Baumwollbezug, waschbar für ROO oder ROO Lite	12 Stück	DL0951GPB12
Dandle® weiße Gelkissen Baumwollbezüge für Größe XS: 15 x 23 cm, waschbar	25 Stück	DL0951GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 25 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 25 cm (pädiatrisch) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14556GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckter Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 25 cm	25 Stück	DL14556GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 25 cm	25 Stück	DL12556GPCB25
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 25 cm (pädiatrisch 2,3 cm dick) mit Bezug aus weißer Baumwolle	12 Stück	DL0956GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus weißer Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 15 x 25 cm	25 Stück	DL0956GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 28 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 28 cm (auch Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: S) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14520GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 28 cm (auch für Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: S)	25 Stück	DL14520GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 28 cm (S)	25 Stück	DL12552GPCB25
Dandle® Gelkissen Größe S: 15 x 28 cm mit weißem Baumwollbezug, waschbar für ROO oder ROO Lite	12 Stück	DL0952GPB12
Dandle® weiße Gelkissen Baumwollbezüge für Größe S: 15 x 28 cm, waschbar	25 Stück	DL0952GPCB25
Gelkissen Größe 15 x 31 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 15 x 31 cm (auch Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: M) mit Bezug aus bedruckter Baumwolle	12 Stück	DL14530GPB12
Ersatzbezüge waschbar, aus bedruckte Baumwolle für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 31 cm (auch für Dandle® ROO2 Gel Kissen Größe: M)	25 Stück	DL14530GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion Gelkissen 15 x 31 cm (M)	25 Stück	DL12553GPCB25
Dandle® Gelkissen Größe M: 15 x 31 cm mit weißem Baumwollbezug, waschbar für ROO oder ROO Lite	12 Stück	DL0953GPB12
Dandle® weiße Gelkissen Baumwollbezüge für Größe M: 15 x 31 cm, waschbar	25 Stück	DL0953GPCB25
Gelkissen Größe 20 x 33 cm		
Dandle® Lion Gelkissen 20 x 33 cm (pädiatrisch) mit Bezug aus weißer Baumwolle	6 Stück	DL19054GPB6
Ersatzbezüge waschbar, aus weißer Baumwolle für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 20 x 33 cm	25 Stück	DL19054GPCB25
Ersatzbezüge Einweg für Dandle® Lion (pädiatrische) Gelkissen 20 x 33 cm	25 Stück	DL12554GPCB25



IMPRESSUM

HERAUSGEBER

MED CARE VISIONS® GmbH
Franz-Lehner-Straße 3
85716 Unterschleißheim

T. +49 89 2000 433 - 0
F. +49 89 2000 433 - 99

info@mcv-group.de
www.mcv-group.de

GEBURTSHILFE & INTEGRATIVE NEUGEBORENE NENVERSORGUNG
SCHWANGERSCHAFT & STILLLEN
ENTWICKLUNGSFÖRDERNDE PFLEGE
NEONATOLOGIE & PÄDIATRISCHE INTENSIVMEDIZIN
ANÄSTHESIE & INTENSIVMEDIZIN FÜR ERWACHSENE



MED CARE VISIONS® GmbH
Franz-Lehner-Straße 3
85716 Unterschleißheim
T. +49 (0)89 / 2000 433 - 0
F. +49 (0)89 / 2000 433 - 99
info@mcv-group.de

Unsere interne Qualitätspolitik verpflichtet uns zu kontinuierlicher Weiterentwicklung und Produktverbesserung. Wir behalten uns daher vor, Produkte bzw. deren Leistungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

© MED CARE VISIONS

www.mcv-group.de